


Helppo ja nopea näytteenotto

1

Näytteenotto: (1) Hius pinni (2) Sakset (3) Kuulakärkikynä

1. Puhdista sakset alkoholi pyyhkeellä.
2. Jaa hiukset päälaelta ja kiinnitä hiuspinnillä.
3. Leikkaa hiuksia viideltä eri alueelta noin 20-30 kappaletta.
4. Leikkaa hiuksia mahdollisimman läheltä päänahkaa.

NOTE: Hiuksia tulisi leikata yhteensä noin 90-120 kappaletta.

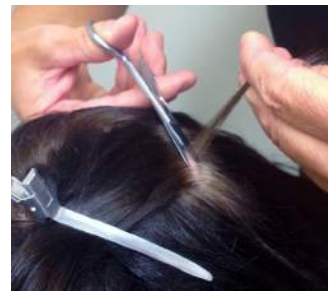


2

1. Laita hiukset kuljetuspakkauksen siten että juuri osa tulee HST merkintää kohden..
2. Suorista hiukset täyspitkiksi siten että juurten päät pysyvät folion reunalla.
3. Käännä HST merkki alas keskiviivalle.
4. Taita uudelleen pituussuunnassa.
5. Kaikki hiukset jotka ovat pidempiä, tulee kääriä folion ympärille.
6. Aseta hiukset näytepakkaukseen.

Huom:

- Näytteenottaja voi taittaa folion tiukemmin tai lisätä taitoksen kiharaisiin hiuksiin..
- Hiusten juurien päitä ei tarvitse kohdistaa kerättäessä ihokarvoja näytteeksi testaukseen.

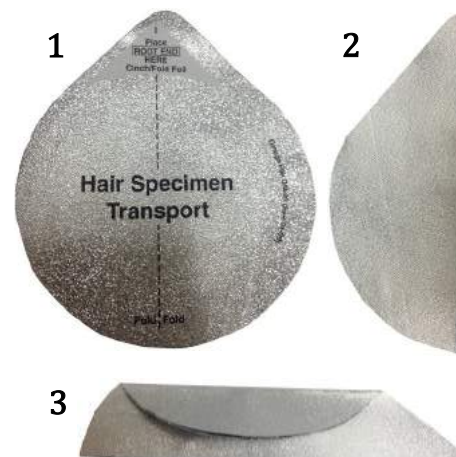

3

Anonyymi testaus

Kun näyte on otettu, niin sulje pakkaus varmistamalla kahdesti sen olevan hyvin suljettu. Merkitse suoritettavien lääkkeiden ja huumeiden testauspaneelit, jotka haluat tutkittavan.

Laillinen testi

Kun näyte on kotelossaan, niin sulje kotelon hihna tiivisteellä varmistaen että isompi kansi tulee varmasti kiinni. Lisää sinetti huolellisesti.

Anonyymi testaus

Laita sinetöity hiusnäytepakkaus kirkkaaseen muoviseen kuljetuspussiin ja aseta se valmiiksi osoitettuun kirjekuoreen. Näyte on nyt valmis lähetettäväksi.



4

Legal Testing

Lisää laillisessa testissä CUSTODY ja CONTROL FORM lomakkeet näytteen mukaan pussiin. Näyte on nyt valmis lähetettäväksi.

Vinkkejä näytteenottoon



1. Leikkaa näytettä usealta alueelta, älä kaikkia yhdestä ja samasta kohdasta.
2. Muista merkitä lomakkeisiin onko hiukset otettu päästä vai ihokarvoituksesta.
3. Älä sekoita päästä kerättyjä ja iholta kerättyjä hiuksia. Testi voidaan suorittaa vain jompaa kumpaa käyttäen.
4. Testissä tutkitaan yhteen testaukseen tarvittava määrä hiuksia. Älä lähetä ylimääräisiä hiuksia.